

ÚVOD

Rýma se u miminek a batolat vyskytuje běžně. Jeden z hlavních problémů představuje fakt, že malé děti se nedokáží samy vysmrkat a trvá nějakou dobu, než se batole nebo dítě naučí dýchat ústy. Zablokovaný nos znesnadňuje dýchání, může způsobit nepohodlí a vést k vážným onemocněním nosu, uší, krku a dýchacích cest. Proto je třeba, aby mělo dítě horní cesty dýchací průchodné. Nosní odsávačka hlenů Arianna® Baby-Vac™ je v tomto ohledu tím ideálním řešením. Samozřejmě není na místě zanedbávat lékařské vyšetření, protože příčinu může diagnostikovat pouze lékař. Odstranění hlenu z nosní dutiny urychluje proces hojení, zlepšuje dýchání, celkový komfort dítěte a napomáhá předcházet nemocem. Použití: Tento produkt je určen k odstranění nosní sekrece a hlenu u dětí. Produkt nepoužívejte k žádnému jinému účelu.

DŮLEŽITÉ INFORMACEPrvní použití

Před prvním použitím produkt pečlivě omyjte horkou pitnou vodou.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky!

Čištění

Po každém použití produkt očistěte. Omyjte jej v teplé vodě z kohoutku, pokud možno okamžitě. Použijte čisticí prostředek vhodný pro děti. Produkt opláchněte horkou nebo teplou vodou. Vnější stranu sací trysky otřete měkkým hadříkem

nebo vatovými tampony napuštěnými ethylalkoholem pro farmaceutické účely. Nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky či chemické a abrazivní materiály.

UPOZORNĚNÍ

V případě hemofilie nebo častého krvácení z nosu požádejte svého lékaře o radu.

Pokud se u dítěte po používání objeví alergická vyrážka nebo zarudnutí, přestaňte produkt používat. Požádejte svého lékaře o radu.

V případě, že produkt používáte u více dětí, doporučuje se sací trysky podepsat a používat je pro každé dítě zvlášť. Pokud to není možné, trysku před každým použitím pečlivě omyjte podle návodu výše.

**VAROVÁNÍ**

- Používejte vysavač o výkonu 800–1800 W. (Bezpečné použití je potvrzeno zkušebními protokoly.) Podívejte se do uživatelské příručky vysavače.
- Nosní odsávačka není hračka pro děti. Produkt může používat pouze dospělá osoba po přečtení návodu k použití.
- Produkt používejte pouze v určené oblasti použití.
- Produkt nepoužívejte, pokud jsou jeho součásti pokaženy nebo chybí.
- Sací trysku (A) otřete měkkým hadříkem nebo vatovými tampony napuštěnými ethylalkoholem pro farmaceutické účely. Nepoužívejte žádné jiné chemikálie.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v suchém a chladném prostředí chráněném před


přímým slunečním zářením a teplem.

NÁVOD K MONTÁŽI


1. Sací trysku (A) vložte do sběrného válce (B).
2. Zapněte vysavač.
3. Vložte konektor vysavače (C) do sací hubice vysavače.

ODSÁVÁNÍ

1. Produkt lze efektivně používat při přirozeném držení těla. Doporučuje se, aby dospělý držel miminko v náručí. Pokud se jedná o batole, dospělý si ho posadí na klín.
2. Sací trysku (A) přiložte k nosu tak, aby zcela zaplnila nosní díрку, a po dobu několika sekund ji v této poloze přidržujte. Zároveň kontrolujte odsávání hlenů.
3. Tyto kroky opakujte pro druhou nosní díрку.
4. Pro urychlení procesu můžete mezi kroky 2 a 3 jemně pohybovat sací tryskou.
5. Doba odsávání pro každou nosní díрку je přibližně 5 sekund.
6. Po skončení vypněte vysavač a produkt vyčistěte podle pokynů výše.
7. Opakujte 2krát až 3krát denně nebo podle potřeby. Životnost produktu jsou 3 roky. Při dodržení návodu je použití bezpečné.

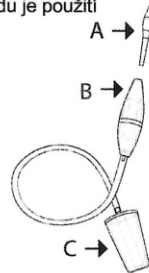

- A: Sací tryska
B: Sběrný válec
C: Konektor vysavače

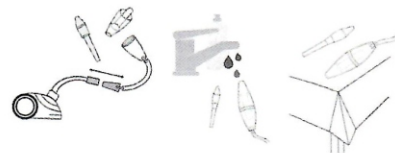DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

1. Vyjměte konektor vysavače (C) ze sací hubice vysavače.
2. Vypněte vysavač.
3. Omyjte části A a B pod horkou tekoucí vodou z kohoutku a očistěte je podle návodu výše.
4. Nechte samovolně uschnout venku.

Použité symboly

	Název a adresa výrobce
	Přečtete si návod k použití
	Varování
LOT	Sériové číslo
	Chraňte před slunečním zářením
v0X	Verze „Návodu k použití“

Název a adresa výrobce:

Illés Csók és Társa Kft.
Budapešť H-1146
Ajtósi Dürer sor 35